

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**PS-WATCH™**  
powered by **Private Sentinel®**

## FONTOS!

A PS-óra nem gyógyászati eszköz, használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot vagy a megfelelő gyógyszeres kezelést.

Használat előtt töltsse fel az eszközt és távolítsa el a kijelzőről a védőfóliát! Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát a 3-as pontban leírtak szerint!

### A DOBOZ TARTALMA:

1 db PS-óra; 1 db kis csavarhúzó; 1 db töltőkábel;  
1 db töltőadapter; 1 db SIM kártya (opcionális);  
1 db előfizetés kupon kód (opcionális)

### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Támogatott hálózatok: 2G, GSM 900/1800 MHz  
Méret: 31,8×58×14,7 mm; Súly: 40 g  
SIM méret: Nano; Tápegység: Li-ion; 580 mAh; 3,7 V

## 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS

Az PS-óra mindenkor viselője felelős annak megfelelő használatáért.

A sérülések elkerülésének érdekében ne tegye ki a PS-órát közvetlen hő vagy szikra hatásának!


Üzemanyagtározók, kémiai- és robbanóanyagok közelében szigorúan tartsa be és kövesse a helyszínen előírt biztonsági előírásokat!

Ne kapcsolja be a PS-órát olyan helyen, ahol a mobilkommunikációs eszközök használata tilos vagy ahol az rádióhullámú interferenciát idézhet elő.

A PS-órát csak arra képesített személy javíthatja. A PS-óra töltéséhez csak a dobozban mellékelt gyári kiegészítőket használja!

Amennyiben beültetett egészségügyi eszközzel él (pl. pacemaker), kérje ki orvosa tanácsát a PS-óra használatára vonatkozóan!

## 2. A PS-ÓRA BEMUTATÁSA

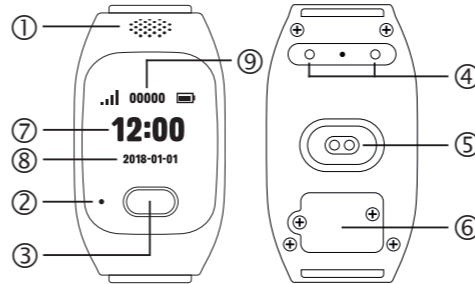

1 – hangszóró

2 – mikrofon

3 – főgomb

4 – töltés érintkezők

5 – vérnyomásmérő

6 – SIM fedél

7 – idő


8 – dátum

9 – lépésszám

... – térerő

... – akku töltöttség

## 3. SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

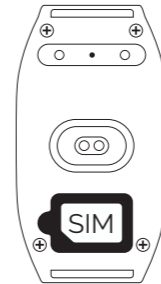

**Egy arra alkalmas mobilkészülék segítségével kapcsolja ki a SIM kártya PIN-kódját!**

Távolítsa el a SIM fedelet! ⑥

Helyezze be a SIM kártyát a fém felével lefele, az ábrának megfelelő pozícióban!

A csavarokat határozottan húzza meg, a megfelelő zárás és szigetelés érdekében!

## BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg hosszan (~3 mp) a főgombot ③ és tartsa úgy, amíg a kijelző világítani kezd!

## 4. REGISZTRÁCIÓ

**A webes regisztráció a megfelelő működéshez elkerülhetetlen. A PS-óra kizárólag regisztráció után válik használhatóvá!**

A regisztrációhoz nyissa meg a [ps-watch.com](http://ps-watch.com) weboldalt számítógépe böngészőjében:



- regisztrálja a gondozottat
- regisztrálja a PS-órát
- adjon hozzá gondozót
- állítsa be a felügyeleti lehetőségeket!

További információt és segítséget a regisztrációhoz a [ps-watch.com](http://ps-watch.com) weboldalon talál.

## 5. A PS-ÓRA MŰKÖDÉSE

### RIASZTÁS INDÍTÁSA:

A főgomb ③ egyszeri hosszú (~3mp) megnyomásával riasztást indíthat. A riasztásról – érvényes előfizetés esetén – értesülnek a közelben tartózkodó felhasználók, a profil oldalon beállított személyek, a gondozó és prémium szolgáltatás igénybevétele esetén a telefonközpont kezelője.

### VÉRNYOMÁSMÉRÉS INDÍTÁSA:

Nyomja meg a főgombot ③ röviden és lépkedjen a menüben, amíg a pulzáló szív ikon megjelenik! Várjon, amíg a PS-óra elvégzi a mérést és enyhe rezgés kíséretében kiírja az eredményt (♥ pulzus, 🩺 vérnyomás)!

### TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA ÉS FOGADÁSA:

Nyomja meg a főgombot ③ röviden és lépkedjen a menüben a telefonkönyvbe elmentett névhez! Nyomja meg hosszan a főgombot, hogy elindítsa a hívást! A vonalat a főgomb egyszeri rövid megnyomásával tudja bontani. A bejövő hívást jól hallható csengés és enyhe rezgés jelzi. A hívás fogadásához röviden nyomja meg a főgombot, és tartsa a PS-órát közel a szájához a beszélgetés alatt!

### A PS-ÓRA KIKAPCSOLÁSA:

Nyomja meg a főgombot ③ röviden és lépkedjen a menüben addig, amíg a kikapcsolás 🛑 ikon megjelenik! Ekkor nyomja meg hosszan a főgombot ③!

## 6. A PS-ÓRA TÖLTÉSE

A töltőkábel USB csatlakozóval ellátott végét csatlakoztassa az adapterhez, a másik végét pedig a PS-óra hátlapján található töltési pontokhoz ④!

A kétpólusú mágneses csatlakozó kizárólag a helyes pozícióban illeszthető a PS-órához. Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzatba!

Amennyiben a PS-órát bekapcsolt állapotban tölti, töltés közben helyezze azt számlapjával lefelé úgy, hogy a felfelé néző vérnyomásmérőre ⑤ ne helyezzen semmit, a hátlapot ne fedje el!

**Ügyeljen arra, hogy a főgomb töltés közben ne nyomódjon be, ezáltal téves riasztást indítva!**

## 7. ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

A távoli felügyelethez a gondozó személynek le kell töltenie a Private Sentinel alkalmazást iOS vagy Android rendszerű mobiltelefonjára.



A gondozott, PS-órát viselő személy webes böngészőben történő regisztrációja során lehetősége van a gondozó és gondozott összekapcsolására.

További információt a [ps-watch.com](https://ps-watch.com) oldalon és regisztráció közben talál.

## 8. FONTOS INFORMÁCIÓ

A készülék por-, csepp-, és vízálló (IP65), de erősen javallott az erős vízszugár és az eszköz víz alatti használatának elkerülése.

A megfelelő egészségügyi értékek mérése érdekében a PS-óra szíját erősebben húzza meg! Ügyeljen rá, hogy ne szorítson túlságosan, de a bőrrel folyamatosan érintkezésben maradjon!

Mielőtt a szervízhez fordulna, kérjük, ellenőrizze: az akkumulátor nem merült-e le / a PS-óra be van-e kapcsolva / van-e a PS-órában SIM kártya. Ha kérdése van, hívja a +36 70 589 0461 számot!

Ha leveszi a PS-órát, lehetőség szerint tegye fel töltőre!

A rendeltetészerű használat mellett bekövetkező meghibásodásért 12 hónapig vállalunk jótállást érvényes számla ellenében. A visszaküldés és jótállás érvényesítésének feltételeiről részletesen tájékozódhat a [ps-watch.com](https://ps-watch.com) weboldalon.

A H10 PS-óra megfelel a RoHS irányelvekre vonatkozó 2011/65/EU és 2014/53/EU előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez kérjük, írjon az [info@ps-watch.com](mailto:info@ps-watch.com) email címre.

A termék nem kezelhető háztartási hulladékként!

Import: HTM Mobile Kft.  
Cím: 1118 Bp., Dayka Gábor u. 3.

